

Durchführung der anterio-nasalen SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests (LEPU Medical) durch Schülerinnen/Schüler in der Schule

(basierend auf Basis des „Manuals für den Einsatz von Selbst- und Schnelltests an Schulen“ des BMBWF – Version 25.01.2021)

Ein anschauliches Video des BMBWF mit entsprechender Information findet sich unter folgendem Link:

https://www.youtube.com/watch?v=XdG520UhHHk&feature=youtu.be&ab_channel=BMBildung%2CWissenschaft%2CForschung

Für alle Testungen gilt:

- Tests dürfen nur auf **freiwilliger Basis** durchgeführt werden.
- Für **Personen unter 14 Jahre** muss ein **Einverständnis von Eltern/Erziehungsberechtigten** vorliegen.
- SchülerInnen, die anwesend sind, aber den Test verweigern werden ins Sekretariat geschickt.

Durchführung der Testung an der Schule (ab der Sekundarstufe I):

Die Tests werden im Klassenverband in der Klasse durchgeführt werden.

Wichtig dabei ist, dass

- der Raum während der Testung **gut gelüftet** wird
- **der Abstand zur Testperson** gewährleistet ist und
- ein **MNS von allen getragen wird, die gerade nicht testen**. Die Lehrperson trägt jedenfalls eine FFP 2 – Maske.

Die Schüler/innen führen die Tests unter Anleitung durch die Lehrpersonen selbst durch.

Für die konkrete Durchführung der Selbsttests unter Einhaltung der Hygienevorschriften wird vom BMBWF folgende Vorgangsweise empfohlen:

- Die Testpersonen sitzen mit Mund-Nasen-Schutz an den Tischen. Dabei soll auf ausreichend Abstand zwischen den Personen geachtet werden.
- Der Raum wird während der Tests gut durchlüftet.
- Die Lehrperson trägt jedenfalls eine FFP 2 – Maske, b. B. Einmalhandschuhe
- Ein Müllsack für die Entsorgung der Testmaterialien ist vorbereitet.
- Die Lehrperson leitet die Schüler/innen in der Durchführung der Tests an. Sie teilt die Tests aus. Die Testkarten und Abstrichtupfer verbleiben bis zur eigentlichen Testdurchführung in der Originalverpackung.
- Die Schüler/innen öffnen die Verpackung der Testkarte und legen die Testkarte aufgeschlagen auf den Tisch.
- Entfernung der Schutzabdeckung des Klebestreifens von der Testkarte, um eine spätere Manipulation zu vermeiden.

- Öffnen der Tupferverpackung und Entnahme des Abstrichtupfers aus der Verpackung.
- Die Probenentnahme erfolgt mit dem Abstrichtupfer aus dem vorderen Nasenbereich.
Dazu den MNS kurz von der Nase entfernen. Den Abstrichtupfer **vorsichtig** ca. 2 cm in den vorderen Nasenbereich einführen (der Kopf des Tupfers soll vollständig in der Nase sein) und den Tupfer 5x im Kreis drehen. Nasenhöhle wechseln und den Vorgang im zweiten Nasenloch wiederholen. Tupfer entfernen.
- Den MNS wieder über die Nase schieben und den Abstrichtupfer in die vorgesehene Öffnung B in der Testkarte schieben, bis er in Öffnung A sichtbar wird.
(Anm.: Der Abstrichtupfer darf dabei nicht abgelegt oder im Bereich des Tupfers anderweitig berührt werden!)
- **6 Tropfen der Pufferlösung in die Vertiefung A auf den Tupfer träufeln.**
Ist von der Lehrkraft durchzuführen
- Danach den Tupfer 2 volle Umdrehungen nach links und 2x nach rechts drehen. Die Vermischung der Pufferlösung mit dem Sekret ist sehr wichtig.
- Karte schließen und linke und rechte Seite zusammenkleben. Der Tupfer darf dabei am Stiel nicht wieder herausgezogen werden. Die Karte flach auf den Tisch legen.
- **Die Testergebnisse werden nach 15 Minuten abgelesen.**
Eine Rotfärbung des Kontrollstreifens C zeigt die korrekte Testdurchführung an. Bei positivem Ergebnis wird auch der Teststreifen T rot (zwei rote Linien).
- Die Schüler/innen werfen die Testmaterialien in den vorbereiteten Müllsack, die Lehrperson sorgt für die Entsorgung.
- Flächendesinfektion der Tische durch die Lehrperson.
- Händewaschen oder Händedesinfektion.

Weiteres Vorgehen nach Ablesen des Testergebnisses:

- Testergebnis negativ: Gesund bleiben und weiter die Schule besuchen.
- Testergebnis positiv: Erziehungsberechtigte und örtliche Gesundheitsbehörde werden über die Schulleitung informiert.
- **Eine Rotfärbung des Kontrollstreifen C zeigt die korrekte Testdurchführung an** d.h. nur Tests mit rotem Kontrollstreifen zeigen ein gültiges Ergebnis! Ein bläuliches Schimmern ist als ungültig zu werten.

Weitere Informationen zum Antigentest inkl. Produktinfo des Herstellers, Schulungsvideos sowie das vollständige Manual finden sich auf der Homepage des Bildungsministeriums.

Dr. Nicole Juric, Dr. Margit Wegscheider (Schulärztinnen BG/BRG Schwechat)